

ACTOSED® FORTE READY

Glutaraldehydbasiertes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für medizinische Instrumente und Endoskope.

Art.-Nr. 01.0303.5

Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: 2 % Glutaraldehyd; Korrosionsinhibitoren und Hilfsstoffe.

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung lesen und verstehen.

ACTO GmbH
Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
info@actogmbh.com


+49 (0) 531 239 50 80
(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif




Wirkungsspektrum	Einwirkzeit
bakterizid	15 Min.
fungizid	15 Min.
tuberkulozid	15 Min.
sporoizid	60 Min.




Wassertemperatur:
Raumtemperatur

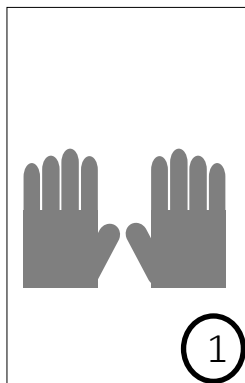

1 Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzkleidung tragen.

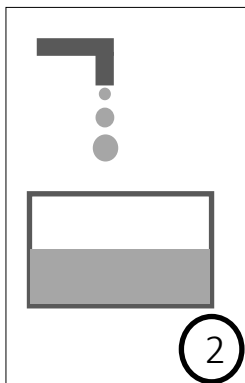

2 Vor Verwendung ist die Desinfektionswanne mit z.B. **Actoclean® Flüssig** und klarem Wasser* gründlich zu reinigen, um Rückstände von Verunreinigungen zu entfernen.

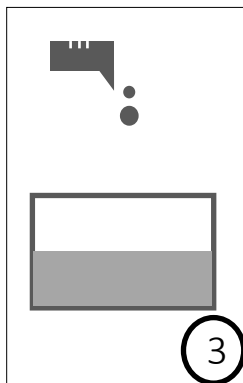

3 Das Mittel vorsichtig in die Desinfektionswanne geben.*** **Actosed® Forte Ready** ist eine gebrauchsfertige Lösung und muss nicht verdünnt werden.

Merkmale:

- geeignet für die High-level Desinfektion medizinischer Instrumente aller Art, z.B. von flexiblen und starren Endoskopen, hitzesensitivem Zubehör und chirurgischen Instrumenten.


Lagerung:

- bei Raumtemperatur lagern
- von Kindern fernhalten

Bei einer unbelasteten Gebrauchslösung ist die Wirksamkeit bis zu 15 Tage gegeben.


Wirksamkeit durch Teststreifen prüfen!

Bei vorzeitiger Kontamination die Lösung vor Ablauf der 15 Tage erneuern!

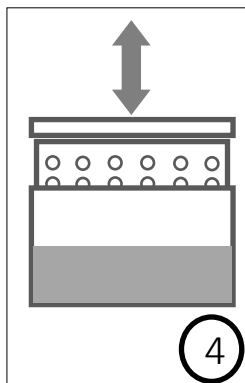


4 Bei unbelasteter Gebrauchslösung ist die Wirksamkeit für bis zu 15 Tage gegeben.

Wirksamkeit durch Teststreifen prüfen!

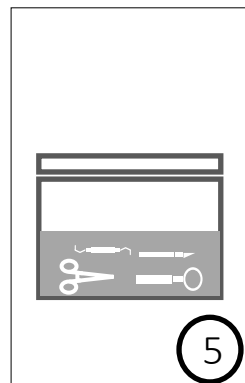


5 Instrumente und Geräte nach Benutzung demontieren und in die Lösung legen. Auf vollständige Bedeckung achten.

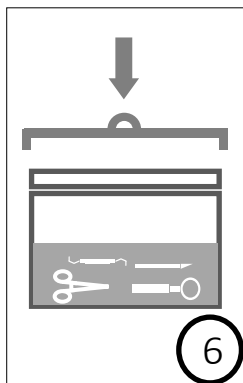

6 Wanne schließen.



7 Einwirkzeit je nach Produkt abwarten. **ACHTUNG!** Die Einwirkzeit beginnt mit dem jeweils letzten eingelegten Instrument.***

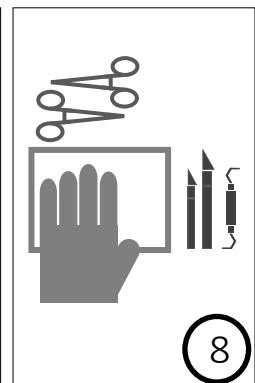

8 Instrumente gründlich spülen und trocknen. Trockene Instrumente visuell auf Sauberkeit kontrollieren. Je nach Erfordernissen die Instrumente / Geräte weiter aufbereiten.

* Das Wasser sollte mindestens Trinkwasserqualität besitzen und Raumtemperatur haben.

** Je nach Präparat ggf. 2 Wannen für getrennte Reinigungs- und Desinfektionsschritt einsetzen (Zwischenspülung durchführen)

*** Falls nach Ablauf der Einwirkzeit verbliebene Verschmutzungen mechanisch entfernt werden müssen, ist der Desinfektionsschritt danach zu wiederholen.

Diese Anweisung einschl. alle Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.